



Patientinformationsbroschyr

TILLHANDAHÅLLS AV KCI, ETT ACELITY-FÖRETAG

Innehållsförteckning

1. Information om företaget	3
2. Vad är V.A.C.® Therapy?	4
3. Hur fungerar V.A.C.® Therapy?	5
4. Vanliga frågor och svar	6-7
5. V.A.C.® Therapy i hemmet	7
6. Information om larm	8
7. Tips vid daglig användning	9
8. Patientsäkerhetsinformation avseende V.A.C.® Therapy	10-11
9. Information till anhöriga och vårdare	11

Din personliga guide till V.A.C.® Therapy

Din läkare har bestämt sig för att behandla ditt sår med V.A.C.® Therapy (V.A.C. = Vacuum Assisted Closure®), som även kallas sårbehandling med vakuum eller negativt tryck.

I den här broschyren kan du läsa om behandlingen och hur den påverkar dig och ditt sår. Om du har några frågor eller är orolig över något ska du inte tveka att kontakta din läkare/vårdgivare. Du kan skriva ned kontaktuppgifterna på sista sidan.

Kontakta behandlande medicinsk personal om du får akuta medicinska problem.

Denna patientinformationsbroschyr om V.A.C.® Therapy tillhandahålls av KCI och är en sammanfattning av viss information som är relaterad till din användning av V.A.C.® Therapy System. Denna broschyr har du fått av behandlande medicinsk personal. Den är inte avsedd att vara en utförlig guide till produktanvändning, -funktion och -placering. Kontakta behandlande medicinsk personal med specifika frågor och för viktig information angående indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder i relation till V.A.C.® Therapy System och avseende apparatens funktion.

Information om företaget

KCI Medical är ett av Europas ledande företag inom medicinsk teknologi och etablerades i Europa för över 20 år sedan. På KCI har vi som uppgift att hjälpa medicinsk personal att optimera resultaten för sina patienter och förbättra vårdkvaliteten för både patienter och behandlande medicinsk personal.

Vi strävar efter ständig förnyelse för att förbättra kvaliteten på våra produkter så att våra patienter kan få de mest effektiva behandlingarna.

Kontakta behandlande medicinsk personal direkt om du har några medicinska frågor.

Vad är V.A.C.® Therapy?

V.A.C.® är en förkortning för Vacuum Assisted Closure® (vakuumassisterad förslutning).

V.A.C.® Therapy använder vakuum (eller negativt tryck) och speciella förband för att underlätta sårsläkning. V.A.C.® Therapy tillförs av ett integrerat behandlingssystem som består av 4 huvudkomponenter:

1. En behandlingsenhet med vätskebehållare (fig 1)
2. En SENSAT.R.A.C.™-dyna med slang för att koppla ihop pumpen med skumförbandet (fig 2)
3. Skumförband (fig 3)
4. V.A.C.®-sårfilm (fig 4)

Behandlingsenhet och behållare



(Fig 1)

Behandlingsenheten är "hjärnan" i det integrerade V.A.C.® Therapy-systemet. Den hanterar, mäter och registrerar det negativa trycket och larmar vid problem.

SENSAT.R.A.C.™-dyna



(Fig 2)

Sårvätska avlägsnas från såret med hjälp av SENSAT.R.A.C.™-dynan och leds in i behållaren.

Skumförband



(Fig 3)

V.A.C.®-skumförbanden är en viktig del av behandlingssystemet. De verkar på cell och vävnadsnivå i kombination med det negativa trycket för att främja sårsläkningen. Behandlande medicinsk personal väljer efter behov mellan förbanden V.A.C.® GRANUFOAM™, V.A.C. WHITEFOAM™ och V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™.

V.A.C.®-sårfilm



(Fig 4)

V.A.C.®-sårfilmen är en självhäftande film som läggs över skumförbandet för att säkerställa en sluten och fuktig sårsläkningsmiljö.

Hur fungerar V.A.C.® Therapy?

V.A.C.® Therapy-skumförband placeras i eller på såret. Behandlande medicinsk personal avgör vilket skumförband som ska användas och detta beror på sårets typ, storlek och plats samt målet med sårbehandlingen.

Skumförbandet och några centimeter av den omgivande huden täcks med en genomskinlig sårfilm. Ett hål klipps ut i sårfilmen och över hålet placeras en SENSAT.R.A.C.™-dyna. Den andra änden av slangen ansluts till behållaren som är kopplad till behandlingsenheten.

När hela V.A.C.® Therapy System är på plats och enheten är påslagen komprimeras skumförbandet. I det här skedet kan du känna en dragande känsla. V.A.C.® Therapy System suger upp ev. sårvätska från såret igenom slangen och samlar upp det i behållaren.

Tillförseln av negativt tryck genom SENSAT.R.A.C.™-dynan och V.A.C.® Therapy-förbanden bidrar till att dra ihop sårkanterna samt avlägsna ev. sårvätska.

Sårets egenskaper avgör vilken behandlingsenhet du får, antingen en INFOV.A.C.™, V.A.C.ULTA™, V.A.C.VIA™ eller ACTIV.A.C.™.

De kliniska riktlinjerna för V.A.C.® Therapy rekommenderar att V.A.C.® Therapy är påkopplad dygnet runt så att den kontinuerligt kan främja sårhelingsprocessen. Följ dock direkta råd från behandlande medicinsk personal.

Kontrollera regelbundet:

- Att systemet är påslaget
- Att alla klämmor är öppna
- Att förbandet är komprimerat



Vanliga frågor och svar

F Hur länge kommer jag att behandlas med V.A.C.® Therapy?

S Det beror på typen av sår och sårets komplikationsgrad samt din kropps förmåga att läka sår. Behandlande medicinsk personal är ansvarig för alla kliniska beslut angående din V.A.C.® Therapy.

F Hur känns V.A.C.® Therapy?

S Många patienter rapporterar en lätt dragande känsla som tenderar att inte märkas efter cirka 15 minuter. När såret läker kan det bli ömt och kliat. Detta är i vanliga fall ett gott tecken men om det fortsätter att kännas obehagligt ska du kontakta behandlande medicinsk personal.

F Hur många timmar per dag måste systemet vara påslaget?

S Vi rekommenderar att behandlingen med V.A.C.® Therapy sker dygnet runt; om systemet måste vara/är avstängt i mer än två timmar åt gången ska du rådgöra med behandlande medicinsk personal.

F Hur ofta behöver förbandet bytas?

S V.A.C.®-förbandet ska bytas en gång varannan till var tredje dag men i regel inte mindre än tre gånger i veckan. Vid infekterade sår kan förbandet behöva bytas oftare. Behandlande medicinsk personal (läkare eller sjuksköterska) kommer tillsammans med dig att ta fram ett schema för förbandsbyte som passar dig.

F Gör det ont att byta förband?

S Vissa typer av sår kan orsaka ett visst obehag. Behandlande medicinsk personal kan ge råd om smärtlindring.



Vanliga frågor och svar

F Hur ser förbandet ut när systemet är igång?

S Förbandet komprimeras när systemet är igång.

F Är V.A.C.® Therapy säkert?

S Ja. V.A.C.® Therapy har använts till mer än 9 miljoner sår över hela världen. V.A.C.® Therapy Systemet har utformats med säkerhet som prioritet. Interaktionen mellan alla V.A.C.® Therapy-komponenterna garanterar en kontrollerad, konsekvent och säker behandling.

F Kan jag förflytta mig?

S Ett viktigt mål med V.A.C.® Therapy är att du ska kunna röra på dig så mycket som möjligt. Detta beror dock på var såret sitter och vilken behandling som behandlande medicinsk personal har ordinerat. Fråga behandlande medicinsk personal om vad som gäller i ditt fall.

F Vad händer om systemet avger ett larm?

S Det visuella larmet beskriver problemets art och de flesta larmen kan enkelt åtgärdas. Detta är något som behandlande medicinsk personal kan förklara och det finns mer information om larm i denna broschyr.

V.A.C.® Therapy i hemmet

Alla V.A.C.® Therapy System finns tillgängliga för användning i både sjukhusmiljö och hemmiljö. Behandlande medicinsk personal avgör om det är lämpligt att du skrivs ut från sjukhuset med ett V.A.C.® Therapy System.

Aktiv med V.A.C.®

Med behandlingsenheterna ACTIV.A.C.™ och V.A.C.VIA™ kan du vara i rörelse och utföra dina dagliga aktiviteter i enlighet med medicinsk rådgivning under tiden som sårbehandlingen fortgår.

Överföring av patient från hemmet till sjukhuset

Var god kontakta behandlande medicinsk personal eller Mediqs kundservice om du blir inlagd på sjukhus medan du får behandling med V.A.C.® Therapy.

Information om larm

Vad händer om V.A.C.® Therapy-enheten avger ett larm?

Det integrerade V.A.C.® Therapy-systemet har både hörbara och visuella larm som beskriver problemets art. De flesta larmen kan enkelt åtgärdas. Detta är något som behandlande medicinsk personal kan förklara mer i detalj före användning, så att du känner dig bekväm med det här säkerhetssystemet.

Av säkerhetsskäl kommer systemet att avge ett larm om något av följande inträffar:

Systemet avger ett larm om...	Åtgärd
Behållaren är full eller blockerad.	Detta larm kommer att höras om behållaren är full eller om slangen är knickad eller blockerad. I denna situation ska behållaren tas bort och bytas ut mot en ny. Detta utförs vanligtvis av behandlande medicinsk personal.
Det finns ett läckage.	Du kan höra ett visslande ljud som indikerar att luft kommer in under sårfilmen. Läckaget finns ofta runt slangen. I detta fall ska läckaget i sårfilmen repareras genom att använda en ny bit sårfilm. Detta utförs vanligtvis av behandlande medicinsk personal.
Batteriet är svagt/urladdat.	Ladda batterier genom att ansluta systemet till vägguttaget.
Behandlingen är inte aktiverad.	Återaktivera behandlingen genom att trycka på strömbrytaren/på-knappen.

Tips vid daglig användning

- Vi rekommenderar att du behandlas dygnet runt med V.A.C.® Therapy, såvida inte annat anges av behandlande medicinsk personal.
- De kliniska riktlinjerna för V.A.C.® Therapy rekommenderar att du inte är frånkopplad i mer än två timmar per dag, om så är fallet bör förbandet bytas.
- Den genomskinliga sårfilmen är vattenfast och du kan tvätta dig eller duscha med förbandet på om:
 - du inte är kopplad till behandlingsenheten
 - slangen är stängd med en klämma
 - du är noga med att förbandet inte blir genomblött.
- Behandlingsenheten är ett elektriskt system och får inte bli våt.
- Om förbanden blir smutsiga ska de tvättas försiktigt med mild tvål och vatten.
- Om knappen THERAPY ON/OFF (BEHANDLING AV/PÅ) stängs av oavsiktligt ska du trycka på samma knapp för att slå på enheten igen. Systemet återgår till de rätta inställningarna och behandlingen fortsätter.

Kontakta din vårdgivare om larmet inte stängs av och du inte har kunnat lösa problemet.

[Kontaktuppgifter till behandlande medicinsk personal:](#)

Namn

Kontaktnummer

Patientsäkerhetsinformation avseende V.A.C.® Therapy

Meddela behandlande medicinsk personal omedelbart om:

- du märker en signifikant förändring av färgen eller konsistensen på vätskan i behållaren, till exempel om du ser att klar vätska blir grumlig eller klarröd.
- du ser en kraftig blödning under sårfilmen, i slangen eller i behållaren.
- du noterar en ökad rodnad eller dålig lukt från såret.
- du upplever ökad smärta.
- V.A.C.® Therapy-enheten är avstängd i mer än två timmar.
- Din medicinering ändras.

Viktigt

- Läs och följ instruktionerna och säkerhetsinformationen.
- Ändra inte inställningarna på V.A.C.® Therapy-enheten och ändra inte/ta inte bort förbandet utan överinseende av behandlande medicinsk personal.
- Försök inte utföra service eller reparation på den här utrustningen.

Säkerhet i hemmet

- Förvara telefonnummer för nödsituationer vid din telefon.
- Placera inte V.A.C.® Therapy-enheten på heta ytor.
- Se till att inga sladdar är placerade på ställen där det är lätt att snubbla på dem.
- Var noga med att inte spilla vätska på enheten eftersom enheten är elektrisk och inte vattentät.

Patientsäkerhetsinformation avseende V.A.C.® Therapy

Infektionskontroll

Om ditt sår blir infekterat avgör behandlande medicinsk personal vilken V.A.C.® Therapy-behandling som är lämplig för dig. Följ instruktionerna om infektionskontroll som du får av behandlande medicinsk personal.

Kontakta omedelbart behandlande medicinsk personal om du tror att ditt sår är infekterat eller om du har något av följande symtom:

- feber
- såret är ömt, rött eller svullet
- huden kliar eller du har utslag
- området runt såret känns mycket varmt
- det kommer var eller dålig lukt från såret

Allergiska reaktioner

Förband, sårfilmer och behållare till V.A.C.® Therapy är bakterie- och latexfria. Använd dem endast en gång och kasta sedan bort dem.

I ytterst få fall har några patienter fått en allergisk reaktion av sårfilmen på huden. Kontakta behandlande medicinsk personal för råd och/eller en kontroll av såret om du får några av följande symtom:

- rodnad
- svullnad
- utslag eller näselfeber
- svår klåda

Uppsök omedelbart sjukvård om du får andningssvårigheter.

Information till anhöriga

Hur kan du som anhörig vara till hjälp?

Som anhörig eller vän till någon som får V.A.C.® Therapy kan du understödja den här behandlingen genom att påminna patienten om vikten av att använda V.A.C.® Therapy enligt ordination av behandlande medicinsk personal.

Kom ihåg att stöd och uppmuntran från din sida kan ha stor betydelse för snabb återhämtning.

Denna patientinformationsbroschyr om V.A.C.® Therapy tillhandahålls av KCI och är en sammanfattning av viss information som är relaterad till din användning av V.A.C.® Therapy System. Den är inte avsedd att vara en utförlig guide till produktanvändning, -funktion och -placering. Kontakta behandlande medicinsk personal med specifika frågor och för viktig information angående indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder i relation till V.A.C.® Therapy System och avseende apparatens funktion. Detta material är avsett för sjukvårdspersonal.

©2010-2016 KCI Licensing, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Alla varumärken som anges häri tillhör KCI Licensing, Inc., dess dotterbolag och/eller licensgivare. DSL#15-0307.SE (Rev. 6/16)