

ABTHERA™

ACTIVE ABDOMINAL THERAPY

ABTHERA™-behandling med negativt tryck av öppen buk

Snabbreferensguide

Viktigt: Den här snabbreferensguiden ges endast som en grundläggande översikt. Se användarindikationerna för ABTHERA™-förbandet och användarhandboken för V.A.C.ULTA™ behandlingsenhet för detaljerade instruktioner, inklusive viktig säkerhetsinformation. För medicinska nödsituationer, kontakta behandlande läkare eller kontakta närmaste akutmottagning. Du ska noggrant läsa och efterleva all litteratur och alla etiketter som kommer med produkten innan användning. Kontakta Acelyty om du har några frågor innan du inleder behandlingen.

Indikationer för användning

- Temporär förslutning i bukväggsöppningar där primär förslutning inte är möjlig och/eller upprepade bukingrepp är nödvändiga.
- Förbandet är avsett att användas vid öppna buksår med exponerade inre organ, inklusive men inte begränsat till abdominell kompartmentsyndrom.
- Den avsedda vårdmiljön är en välövervakad avdelning på sjukhus för akutvård, t.ex. en intensivvårdsavdelning. Bukförbandet kommer oftast att användas i operationssalen.

ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™-förband för öppen buk



1. Inre skyddsskikt
2. Perforerat skumförband
3. Sårfilm
4. SENSAT.R.A.C.™ dyna och slangar
5. Enhet för behandling med negativt tryck
6. Behållare (1 000 ml)

V.A.C.ULTA™ behandlingsenhet



Installera behandlingsenheten

1. Sätta behållaren på plats



V.A.C.®-behandling: Behållare 500 ml eller 1 000 ml (endast akutvård)

2. Anslut förbandsslangarna (efter att förbandet har applicerats)



OBS: Se bruksanvisningen för all information om hur man applicerar ett förband.

Påbörja V.A.C.®-behandling

Tryck på och håll inne strömbrytaren tills lampan tänds.



Välj V.A.C.®-behandling ABTHERA™-behandling ska inte användas med alternativet VERAFLOR™-instillationsbehandling.
 Konfigurera V.A.C.®-behandlingen enligt beskrivning. Välj inställningen Kontinuerlig (standard) och välj OK.
 Välj OK för att acceptera inställningarna


V.A.C.®-behandlingen påbörjas

Kontraindikationer

- Patienter med öppna buksår som har icke-enteriska ej undersökta fistlar ska inte behandlas med ABTHERA™-behandling.
- Skydda vitala strukturer med ABTHERA™ inre skyddsskikt under hela behandlingen. Placera aldrig exponerat skumförband i direkt kontakt med exponerade tarmar, organ, blodkärl eller nerver.

Applicering av ABTHERA™ – inre skyddsskikt

Du kan anpassa storleken av det inre skyddsskiktet genom att vika (alternativ 1) eller klippa till det (alternativ 2). Framsidan och baksidan av det inre skyddsskiktet är identiska.

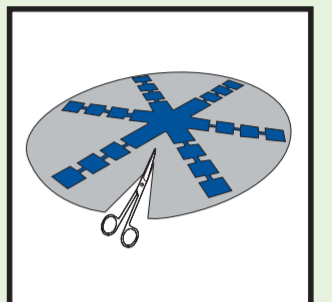


WARNING: Skumförbandet är inkapslat för patientens säkerhet. Skydda vitala strukturer med ABTHERA™ inre skyddsskikt under hela behandlingen. Placera aldrig exponerat skumförband i direkt kontakt med exponerade tarmar, organ, blodkärl eller nerver.

WARNING: Hemostas måste uppnås före placering av förbandet.

Fastställ hur förbandet ska placeras för den specifika användningen. Om det inre skyddsskiktet ska placeras runt slangar, dränering eller ligamentum falciforme (det skärformade leverligamentet) klipper du endast mellan skumarmarna, som visat. (Klipp inte nära eller genom skumförbandet).

Alternativ 1: Anpassa storleken av det inre skyddsskiktet genom viking (rekommenderad metod)

Håll förbandet i kanten och lyft upp det något. Sänk sedan förbandet över den perikoliska rännan samtidigt som du försiktigt och jämnt stryker ut förbandet med den andra handen. Vik upp eventuellt överflödigt material på det inre skyddsskiktet.

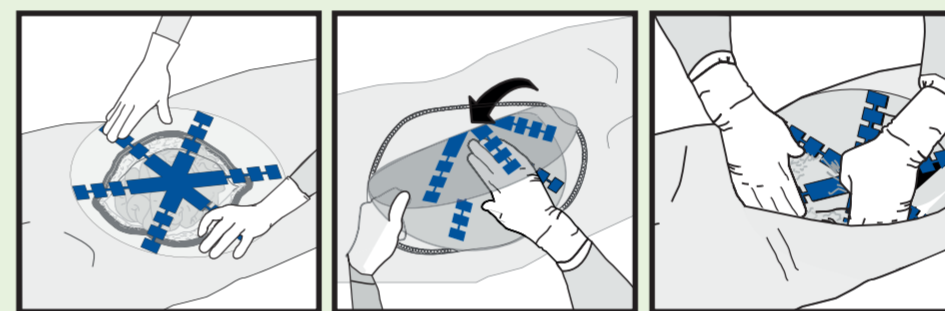


Alternativ 2: Anpassa storleken av det inre skyddsskiktet genom att klippa till det

OBS: Eftersom det inre skyddsskiktet ska vara djupt nedtryckt i de parakoliska rännorna behöver man oftast inte klippa i det. Se alternativ 1 för den rekommenderade metoden.

1. Klipp till det inre skyddsskiktet, bort från såret och genom de stora fyrkantiga skumbitarnas mittpunkt, med en steril sax (fig. A). Klipp inte genom de smala angränsande flikarna mellan de stora fyrkantiga skumbitarna.
2. Kläm ihop återstående hälft av den fyrkantiga skumbiten och angränsande flik och dra. Skumbiten och fliken separeras vid nästa fyrkantsbit (fig. B). På så sätt säkerställs att det inre skyddsskiktets kant täcker den exponerade skumkanten (fig. C) och att skumförband inte kommer i kontakt med organ, se **WARNING** ovan.

OBS: Dokumentera hur många skumbitar som avlägsnats och att varje bit hanterats på rätt sätt och tagits bort från sårhålan.

VIKTIGT: Klipp inte skumförband över såret, eftersom fragment kan falla ned i såret. Gnugga eller trimma skumförbandet på avstånd från såret, och se till att lösa partiklar inte kan falla in i eller lämnas kvar i såret när förbandet avlägsnas.

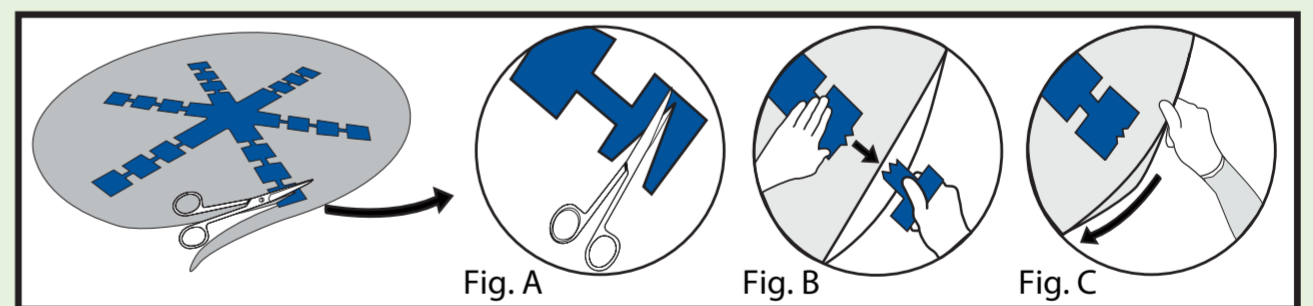

Applicering av perforerat skumförband och sårfilm


OBS: Eftersom det inre skyddsskiktet ska vara djupt nedtryckt i de parakoliska rännorna behöver man oftast inte klippa i det. Se alternativ 1 för den rekommenderade metoden.

Placera försiktigt det perforerade skumförbandet i sårhålan, över det inre skyddsskiktet. Se till att det perforerade skumförbandet inte hamnar under nivån för bukingisionen eller -såret. Tvinga inte in skumförbandet i någon del av såret.

VIKTIGT: Klipp inte skumförband över såret, eftersom fragment kan falla ned i såret. Gnugga eller trimma skumförbandet på avstånd från såret, och se till att lösa partiklar inte kan falla in i eller lämnas kvar i såret när förbandet avlägsnas.

OBS: För att undvika att huden runt såret utsätts för trauma ska sårfilmen inte dras eller sträckas över skumförbandet. Minimera förekomsten av veck och rynkor eftersom dessa kan ge upphov till läckage av negativt tryck (se avsnittet Försiktighetsåtgärder, skydda huden runt såret, i användarhandboken).

OBS: Om flera bitar sårfilm används måste man se till att sårfilmernas kanter överlappar varandra så att förslutningen blir tät. Klipp ett 2,5 cm stort hål i sårfilmen för applicering av SENSAT.R.A.C.™-dynan.

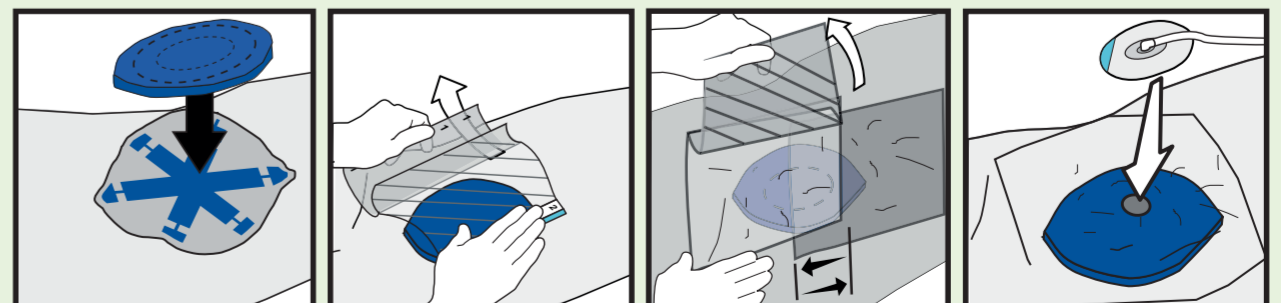

Om du vill ha mer information kontaktar du din Acelyty-representant eller besöker oss på kci-medical.com

OBS: Särskilda indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och säkerhetsinformation finns tillgängliga för KCI:s produkter och behandlingar. Vänligen rådgör med läkare och läs produktens bruksanvisning innan användning. ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ OA-förbandet har utformats för användning med den behandling med negativt tryck som ges av behandlingsenheterna INFOV.A.C.™ och V.A.C.ULTA™. När du använder V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten ska du inte välja alternativet V.A.C. VERAFLOR™-instillationsbehandling. Läs bruksanvisningen. ABTHERA™ OA-förbandet ska endast användas med ABTHERA™ NPT-enheten.

Upphovsrätt 2016, 2018 KCI Licensing, Inc. Med ensamrätt. Om inget annat anges tillhör alla varumärken som anges här KCI Licensing, Inc., dess dotterbolag och/eller licensgivare. PRA-PM-SE-00013 (12/18)